


Inhalationstopf

GEBRAUCHSANWEISUNG

Liebe Kundin, lieber Kunde!



Wir haben hier einige wichtige Informationen für Sie zusammengestellt. Lesen Sie diese aufmerksam durch, dann werden Sie lange Freude mit diesem Artikel haben. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels geben Sie auch diese Gebrauchsanweisung mit.

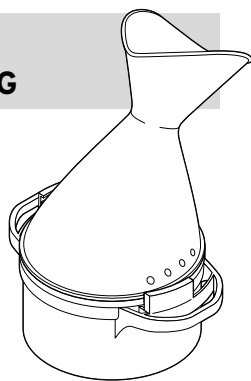

Ihr Tchibo Team

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Inhalationstopf ist dazu bestimmt, Dampf einer Inhalationslösung (Wasser und Inhalationszusatz) gezielt durch Nase und Mund zu inhalieren. Die heiße Inhalationslösung im Unterteil verdampft und wird durch das trichterförmige Oberteil Mund und Nase zugeführt.

Der Inhalationstopf unterstützt so eine wirksame und effektive Inhalationsbehandlung von Erkrankungen der oberen Atemwege.

Das Inhalieren kann helfen ...

- ... die Schleimhaut abzuschnellen,
- ... Entzündungen zu mildern,
- ... Hustenreiz zu lindern,
- ... Atemwege zu befreien u.v.m.

Zu allen Fragen bezüglich der Anwendung und der Inhalate bzw. Inhalationszusätze wenden Sie sich unbedingt an Ihren Arzt oder Apotheker.

- Personen mit chronischen Atemwegserkrankungen müssen Art, Dosierung und Dauer der Anwendung unbedingt zuvor mit Ihrem Arzt besprechen.

Der Inhalationstopf darf nur für seinen bestimmungsgemäßen Gebrauch verwendet werden.

Warnung! Verbrühungs-/Verbrennungsgefahr


- Der Artikel darf nicht verwendet werden, wenn eine Person Wärme nicht richtig wahrnehmen kann. Kleine Kinder reagieren empfindlicher auf Wärme. Bestimmte Krankheiten, wie z.B. Diabetes, können mit Temperatur-Empfindungsstörungen einhergehen. Behinderte oder Gebrechliche können sich evtl. nicht bemerkbar machen, wenn es ihnen zu warm wird. Verwenden Sie den Artikel deshalb nicht bei hilflosen, kranken bzw. hitzeunempfindlichen Personen sowie bei Kindern unter 3 Jahren, da Kinder unter 36 Monaten über deutlich empfindlichere Haut und Schleimhäute verfügen. Fragen Sie ggf. zuvor Ihren Arzt oder Apotheker.
- Kinder dürfen den Inhalationstopf nur im Beisein eines Erwachsenen verwenden. Lassen Sie den Inhalationstopf auch nicht unbeaufsichtigt stehen. Kein Spielzeug!
- **Achtung:** Heiße Wasserdämpfe können zu Verbrühungen der Atemwege führen. Verwenden Sie kein kochendes Wasser! Nähern Sie sich dem Trichter nur vorsichtig mit dem Gesicht. Atmen Sie nicht sofort tief ein!
- **Achtung:** Hantieren Sie vorsichtig mit dem Inhalationstopf. Befüllen Sie ihn nach Möglichkeit am Ort der Anwendung. Wenn Sie ihn transportieren müssen, fassen Sie ihn stets mit beiden Händen an den Griffen. Topf und Trichter können sehr heiß werden. Stellen Sie den Inhalationstopf kippsicher auf. Durch Anstoßen oder Kippen des Inhalationstopfes kann heiße Flüssigkeit austreten, was zu Verbrühungen führen kann.
- Achten Sie vor jeder Anwendung auf sichtbare Schäden am Inhalationstopf. Benutzen Sie keine defekten Produkte.

Vorsicht! Risiko von Gesundheits- und Sachschäden

- Nicht zur Zubereitung von Lebensmitteln geeignet.
- **Nicht in der Mikrowelle**, im Grill oder im Backofen erwärmen.
- Verwenden Sie stets eine ebene, hitzebeständige Unterlage.

Wasser einfüllen

1. Drehen Sie den Trichter vom Inhalationstopf ab.
Vorsicht! Füllen Sie das Wasser nie durch den Trichter ein!
2. Stellen Sie den Topf auf einer ebenen, hitzebeständigen Unterlage ab.
3. Füllen Sie **warmes (max. 90 °C), aber niemals kochendes** Wasser ein.
4. Füllen Sie den Topf bis maximal einen Fingerbreit unter den umlaufenden Absatz.
5. Setzen Sie den Trichter auf und drehen Sie ihn bis zum Anschlag fest.
6. Prüfen Sie vor der Anwendung, ob der Inhalationstopf dicht und fest verschlossen ist.

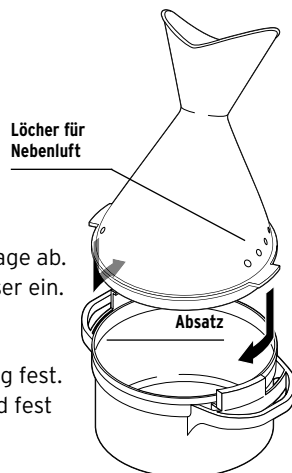

Gebrauch

WARNUNG! Verbrühungsgefahr durch Wasserdampf und austretendes heißes Wasser.

Verbrennungsgefahr durch erhitzte Oberflächen des Inhalationstopfes. Den heißen Artikel nur an den Griffen anfassen.

- ▷ Zubereitung, Dosierung, Dauer und Häufigkeit der Anwendung nach Absprache mit dem Arzt oder Apotheker und nach Angabe der Verpackungshinweise des Inhalats.
- ▷ **Nähern Sie sich dem Trichter nur vorsichtig mit dem Gesicht. Atmen Sie nicht sofort tief ein!**
- ▷ Atmen Sie ruhig und gleichmäßig.
Bei Schwindel, Unwohlsein, Herzrasen, Atemnot, Überhitzungsgefühl oder anderen Beschwerden brechen Sie die Anwendung sofort ab.
- ▷ Inhalieren Sie nur so lange, wie es für Sie angenehm ist. Überwachen Sie Kinder und gebrechliche Personen auf Zeichen von Unwohlsein.



Aufbewahren und Pflege

- Leeren Sie den Artikel nach **jedem** Gebrauch komplett aus und spülen Sie ihn gründlich mit warmem Wasser und einem handelsüblichen Spülmittel. Der Artikel ist auch spülmaschinengeeignet.
-  Bewahren Sie den Artikel an einem kühlen, trockenen, dunklen Ort auf. Schützen Sie ihn vor direkter Sonneneinstrahlung.



Haltbarkeit

Dieser Artikel unterliegt – wie jedes Material – einem natürlichen Verschleiß je nach Umgebungsbedingungen und Benutzungshäufigkeit. Überprüfen Sie Topf und Trichter vor jeder Verwendung auf Verschleißerscheinungen und Schäden.

Stellen Sie einen Schaden daran fest, tauschen Sie den Artikel gegen einen neuen aus.

Fassungsvermögen Topf: max. 600 ml



Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.de



www.tchibo.de/anleitungen

REF 349 276 / Stand: 2017-04



Das Produkt ist konform mit der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte.